

**ヤガミ**

# AED (自動体外式除細動器)

## 8年保証安心パック

PHYSIO CONTROL **LIFEPAK**  
CRPlus



長期保証


**8年**

耐用期間

**8年**

消耗品

**0円**

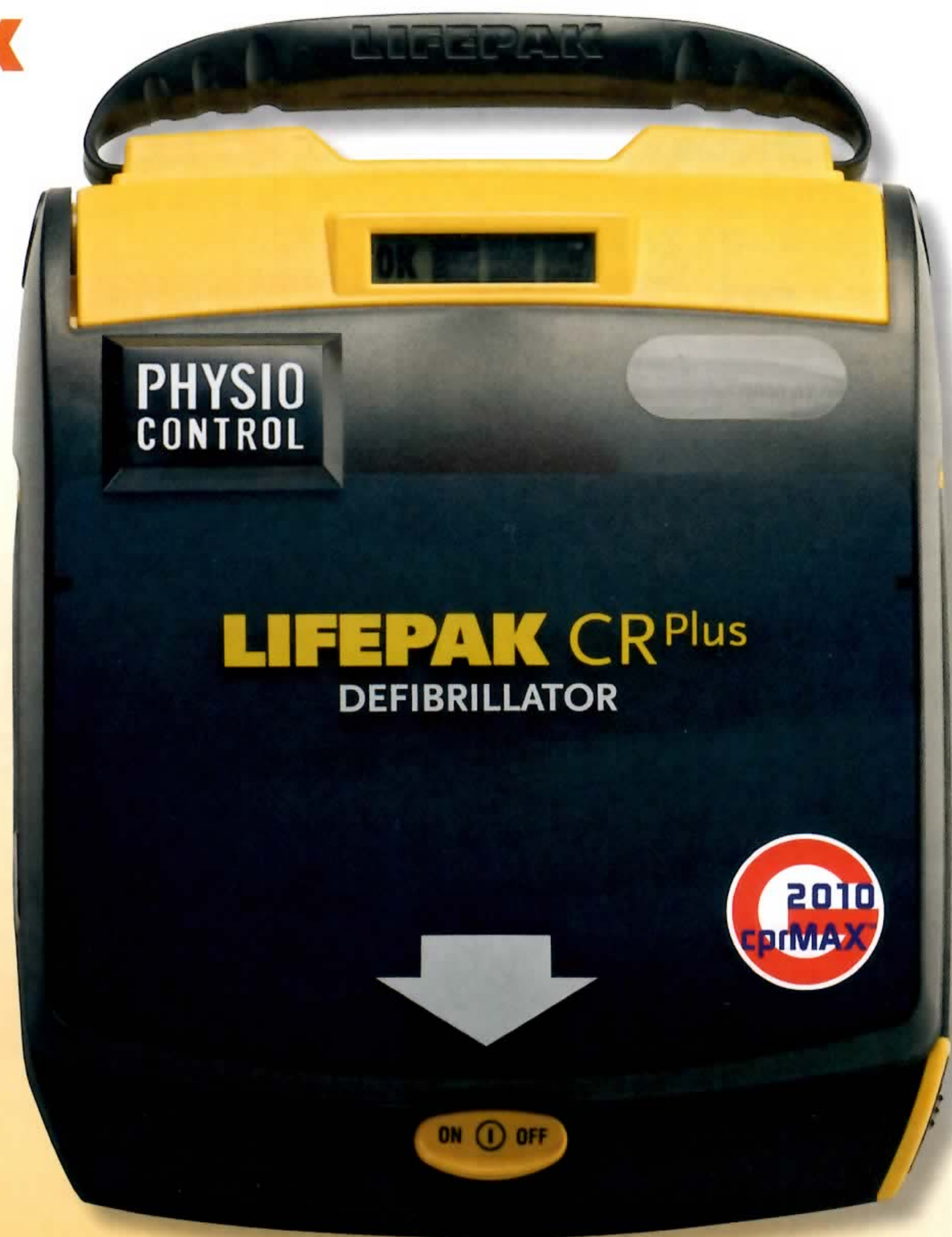

## 設置後の悩み解消!

消耗品を交換時期に送付し、**管理をサポート**

8年分の消耗品費用が含まれているので、  
**追加費用が発生しません**



AEDは、2004年に医療従事者以外の一般市民による使用が認められて以来急速に普及し、平成24年12月現在で日本国内に44万台強導入されています\*。

AEDは救命処置のための医療機器で、適切な管理が行われなければ、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあります。

※厚生労働科学研究「AEDの普及状況に係わる研究」

## AEDの意外と知らない重要なこと

### AEDには 耐用期間があります！

使用環境や単位時間内の稼働時間や使用回数などを考慮し、耐久性に係わるデータから概ね6～8年の耐用期間が設けられています。耐用期間が過ぎたAEDは製造時の信頼性と安全性を維持できなくなる可能性があるため、買い替えをお奨めします。

### 電極やバッテリーにも 有効期限があります！

AEDがいつでも正しく使用できるよう電極やバッテリーなど消耗品管理が重要です。そのため交換時期を日頃から把握する必要があります。

## こんなことで困っていませんか？

### 消耗品管理の手間や予算化……

設置時期が異なったり設置台数が多くなれば、消耗品管理が複雑になり手間と時間がかかります。  
交換するタイミングや購入時期に合わせて、消耗品の予算化も必要です。



## CR Plus 8年保証安心パックを導入いただければ、 これらの悩みを解消できます！

### PHYSIO CONTROL **LIFEPAK** CR Plus

#### 自動体外式除細動器 (AED) CR Plus 8年保証安心パック

医療機器  
販売許可

5224400 ¥339,000 (税込¥366,120)

**NEW** 5230600 小児用電極付 ¥421,000 (税込¥454,680)


リース・割払は  
別途ご相談ください



#### 8年保証安心パックのご注意点

- ※ユーザー様が医療機関や消防関係、高齢者施設等の場合は本パックの対象外とさせていただきます。
- ※8年間の本体保証には、フィジオコントロールジャパン(株)が提供する、PUSH会員への登録が必要です(無料)。
- ※5224400 8年保証安心パックには小児用電極は含まれていません。  
小児用電極が必要なユーザー様は5230600 8年保証安心パック小児用電極付をお求め下さい。
- ※詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

長期保証 **8年**    耐用期間 **8年**    消耗品 **0円**

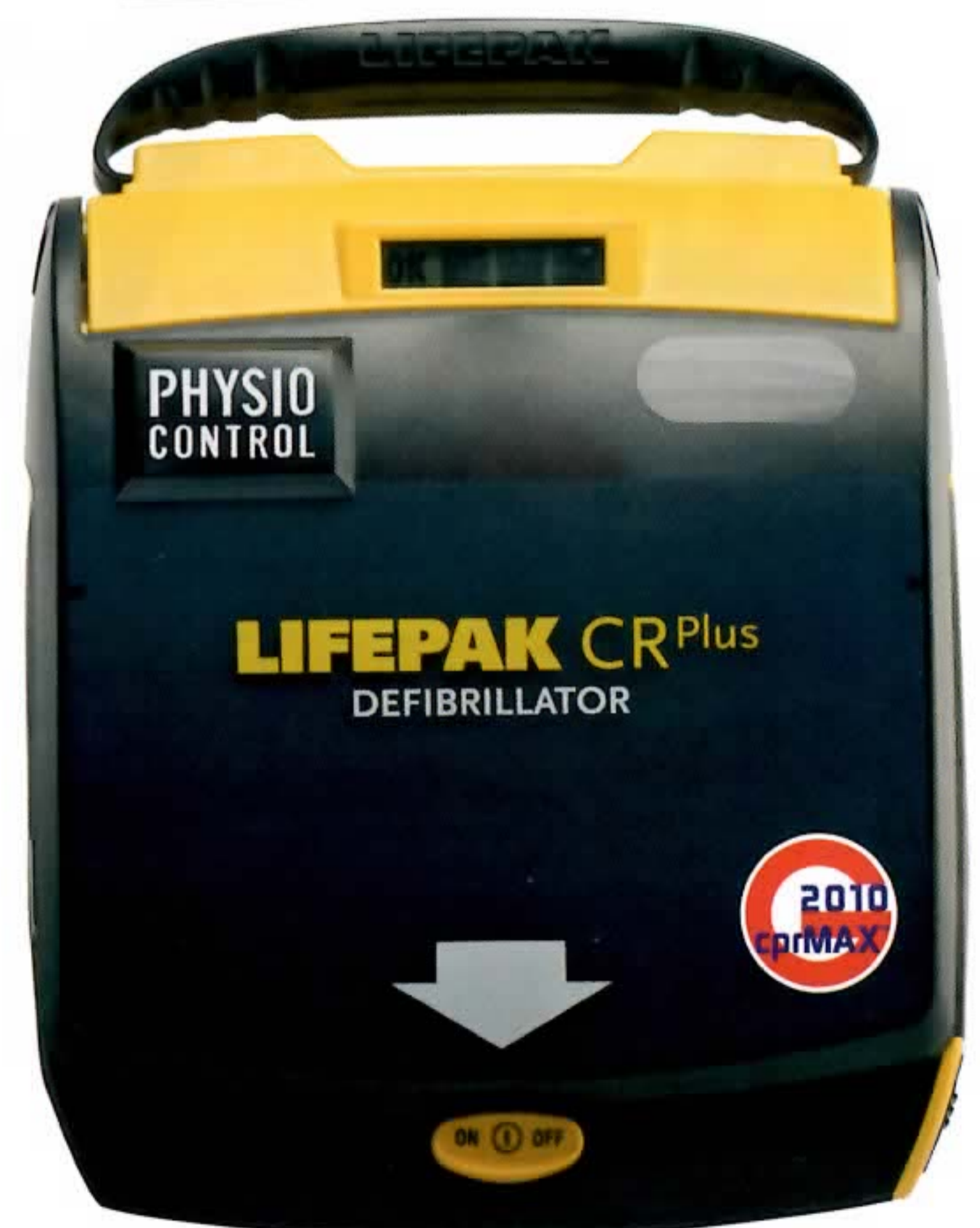

# 8年保証安心パックが多くのお客様に選ばれる理由



とっても経済的！耐用期間8年<sup>※1</sup>

耐用期間  
**8年**

## 一般のAEDと8年保証安心パックの買い替え頻度比較

設置から15年間で比較した場合、更新回数を1回分減らすことができます。

長期間で比較すると8年保証安心パックは買い替え頻度が少なく済むため経済的です。



※1 耐用期間とは、医療機器が適正な使用環境と維持管理の基に、適正な取り扱いで本来の用途に使用された場合、その医療機器が設計仕様書に記された機能及び性能を維持し、使用することができる標準的な使用期限です。



とっても安心！8年間長期保証<sup>※2</sup><sup>※3</sup>

長期保証  
**8年**

保証期間を5年から国内最長の8年<sup>※4</sup>まで延長いたします。長く安心してご使用頂けます。

※2 保証期間とは、お客様による不適切な取り扱い及び天災などでの事故以外で、製造メーカーが責任を負うべき不良が発生した際の無償修理期間です。

※3 フィジオコントロールジャパン(株)が提供する、PUSH会員登録が必要です(無料)。

※4 2015年1月現在 当社調べ。



消耗品管理がラク！

8年間で必要な電極パッドとバッテリーを交換時期に送付し、有効期限管理をサポートします。管理者が変わったり交換時期がわからなくなっても、安心してお使いいただける環境をご提供します。



万が一の使用時も追加費用は発生しません！

消耗品  
**0円**

消耗品の定期交換分はもちろん、万が一使用した場合でも無償で必要な消耗品を送付しますので追加費用は一切発生しません。ご購入後は、消耗品の予算化が不要です。

## たくさんのお客様の声から一部をご紹介します

消耗品の交換管理をしなくて済むのはとにかく楽でいい。  
保証期間8年も大変魅力で、買い替えの頻度が他社にくらべて少なくて済むのはコスト面でお得感がある。  
(大手ビル管理会社)



今回の購入は古い機種からの切り替えだが、5年、6年はすぐに経過してしまうので、保証期間の一番長い機種を選んだ。年数で見るとコストメリットも高い。  
(大手ホテルチェーン)



保証期間が一番長く、パックにすると消耗品管理の手間が減り助かる。  
(某フィットネスチェーン)



世界的にシェアの高いAEDで信頼感がある。  
シンプルな作りで操作がしやすい。  
(外資系メーカー)



自動体外式除細動器 (AED) CR Plus

8年保証安心パック




5224400 ¥339,000 (税込¥366,120)

**NEW** 5230600 小児用電極付き ¥421,000 (税込¥454,680)

除細動部	波形:二相性(ADAPTIV™Biphasicテクノロジー採用) 出力エネルギーパターン:200J、300J、360J 充電時間:200J充電に9秒以下、360J充電まで15秒以下 除細動回数:(内部バッテリー満充電時)通常30回通電、 又はオン時間210分、最低20回通電、 又はオン時間140分
メッセージ	音声メッセージ
表示部 (インディケータ)	正常(使用可)、チャージパック交換時期(緊急時使用可)、 内蔵バッテリー残量少(緊急時使用可)、 点検又は動作不良(使用不可)
メモリ	ECG他イベント等最低20分記録(前の患者は要約データ)、 出力:CODE STAT SUITE(ソフトウェアアプリケーション) によるダウンロード
電源	チャージパック充電器(リチウム電池)
安全性	耐衝撃:MIL-STD-810E、Method516.4 耐振動:MIL-STD-810E、Method514.4 防水:IEC60529/EN60529IPX4
大きさ・重量	約20.3(幅)×10.7(高さ)×24.1(奥行)cm、 約2.0kg(充電器、電極含む)
動作温度	0~50℃
保管温度範囲	-40~70℃(暴露時間が1週間以内であれば、チャージパ ック充電器および電極つきで可)

一般的名称:半自動除細動器  
医療機器分類:高度管理医療機器、特定保守管理医療機器  
医療機器承認番号:21700BZY00251000

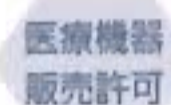

※定められている性能仕様はすべて、運用する前に動作温度で装置を(2時間以上)保管  
していると想定しています。

CR Plus 8年保証安心パック付属品

- キャリングケース(肩ひも付)
- クイックパック電極(2組)
- レスキューセット
- オリエンテーションDVD(1枚)
- 設置表示ステッカー(1枚)
- 8年分のバッテリーと電極パッド(定期交換3回)
- 万が一使用した場合の交換用バッテリーと電極パッド(回数制限なし)

使用方法がよくわかるDVD

救急現場におけるAED(ライフバックCR Plus)の使用方法が、ドキュメント  
タッチで映像化され、どなたにもわかり  
やすく理解できます。



レスキューセット

ベルトも容易に切れる万能はさみをは  
じめ、体毛の濃い患者に対する確実な  
除細動を行うため体毛剃り用のカミソ  
リ、救命時の感染予防に有効な手袋や  
CPR用のマスクなどを専用ポーチに  
セット。



忘れないで日常点検!


AEDは救急処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用  
できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点  
検することが重要です。

電極パッド、バッテリーには有効期限があります。電極パッドは再使用できません。  
不測の事態が発生した場合、又は譲渡時、廃棄時には、製造販売業者又は販売業者  
の連絡先に速やかに御連絡下さい。  
設置の際には必ず取扱説明書及び添付文書をお読み下さい。

自動体外式除細動器 (AED) CR Plus

5207200 **バックなし** ¥285,000 (税込¥307,800)

付属品 キャリングケース(肩ひも付)、クイックパック電極(2組)  
レスキューセット、オリエンテーションDVD  
表示設置ステッカー(1枚)

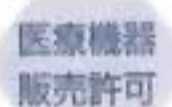

CR Plusの消耗品は交換用キットのみ。  
購入後のランニングコストも抑えます。

PUSH 登録で本体保証期間が延長できます!

5207200 CR Plusパックなしをご購入いただいた方も、ご購入  
時にフィジオコントロールジャパン(株)が提供するウェブベースの会  
員制情報提供サービス「PUSH」へ登録することで、本体保証期間  
も5年から8年に延長されます。さらに、同サービスへ登録すること  
により、以下のサービスが無料でご利用いただけます。

- ① AEDや関連品の所在管理
- ② バッテリーや電極パッドなどの消耗品の有効期限管理と事前お知らせ
- ③ 製品に関する様々な情報提供サービス及びお問い合わせへの対応

※定期交換分及びご使用時の消耗品は別途、ご購入いただく必要がございます。



CR Plusの消耗品・別売品

交換用キット

5207100 ¥18,000 (税込¥19,440)

<キット内容>  
クイックパック電極2組、  
チャージパック充電器1個

一般的名称:体表用除細動電極  
医療機器分類:一般医療機器  
医療機器承認番号:13B1X00261P00001



小児用電極スターターキット

5212100 ¥25,000 (税込¥27,000)

<キット内容>  
小児用電極専用ポーチ、  
クイック操作ガイド、小児用電極×1、取扱説明書

一般的名称:体表用除細動電極  
医療機器分類:一般医療機器  
医療機器承認番号:13B1X00261P00002



交換用小児用電極(1組)

5212200 ¥19,000 (税込¥20,520)

一般的名称:体表用除細動電極  
医療機器分類:一般医療機器  
医療機器承認番号:13B1X00261P00002

レスキューセット

4695600 ¥2,300 (税込¥2,484)

<キット内容>  
人工呼吸用携帯マスク(手袋付)1個、万能はさみ1個、  
体毛剃り用カミソリ1個、ガーゼ2枚、専用ポーチ



データレビューソフトウェア(CODESTAT SUITE(英語版のみ))

5211900 ¥170,000 (税込¥183,600)

ライフバックCR Plusに記録保存された救助イベント情報をPC画面上で確認、編集することができ、レポート印刷や  
データ管理も容易です。・ECG(心電図)他・救助イベント情報等

データ転送ソフトウェア(DT Express 4.0(英語版のみ))

5211700 ¥30,000 (税込¥32,400)

心電図(ECG)や救助イベント情報をダウンロード、転送、レポートを印刷できます。

動作基本  
条件  
(パソコン)

- ①システム条件
- ②ハードディスク
- ③IrDAポート又はアダプタが必要
- Windows XP SP 3以上
- インストール時:最低80MB以上の空きスペース
- データのインポート処理:最低100MB以上の空きスペース
- Windows Vista(32-bit)
- Windows 7


# シンプルメンテナンスと操作性を追求



## メンテナンス性 メンテナンスは簡単シンプル!

電極とバッテリーは使用期限を同じに設定することで同時交換を実現しました。消耗品個々の使用期限を管理する必要がなく、管理の手間を軽減しました。

セルフチェック機能が装置の状態を定期的にチェック。電極パッドとバッテリーの日常のメンテナンスはインディケータのOKマークを確認するだけ。

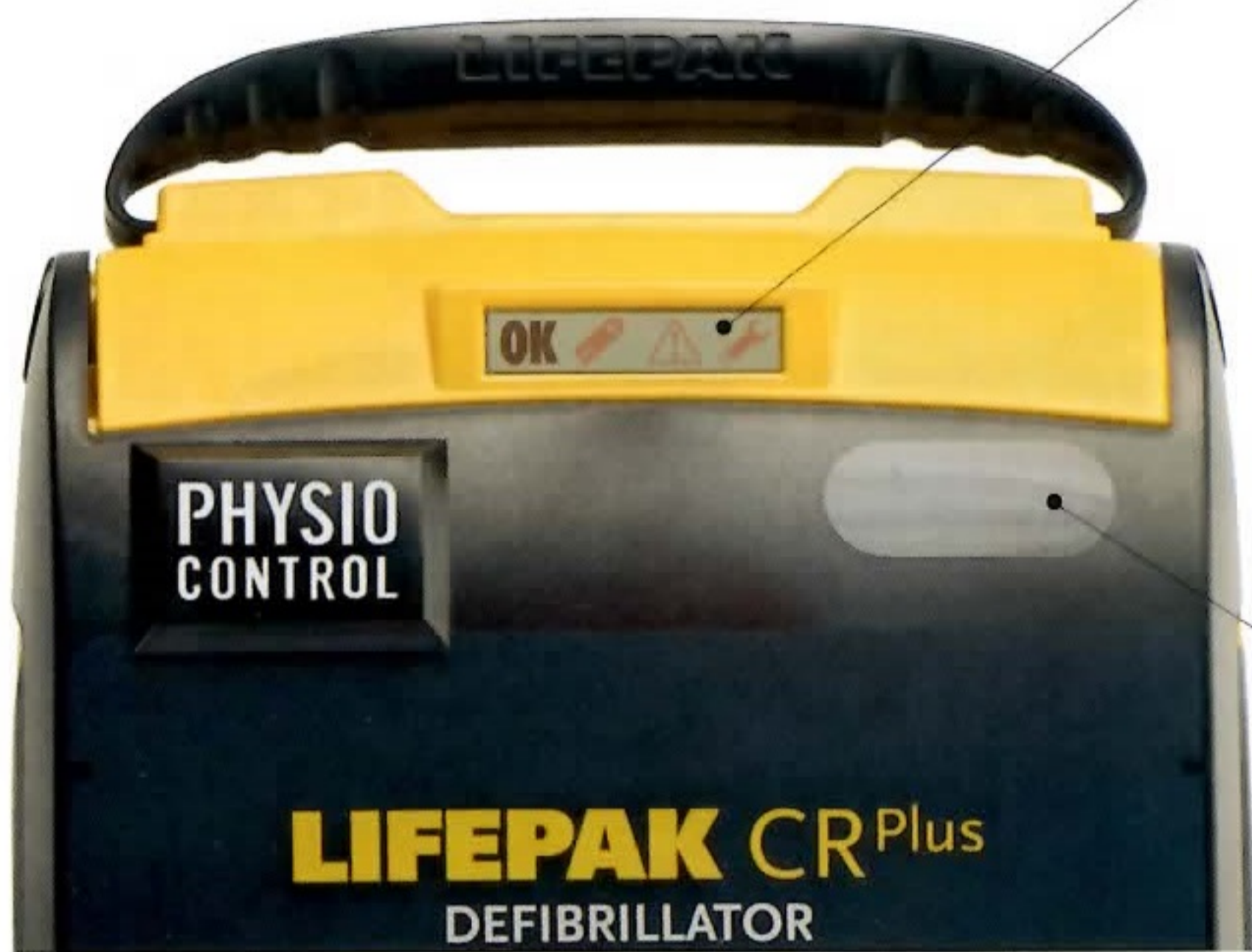

### インディケータ

トラブル内容が一目で分かるインディケータ

正常	OK	使用可能
チャージパック充電器 交換時期		緊急時使用可能 チャージパックを速やかに交換してください。
内蔵バッテリー残量少 最初に点灯時のバッテリー容量:6回 通電可又は45分継続電源ONが可程度		緊急時使用可能 大至急チャージパックを交換してください。
正常に動作しないか、動作 が妨げられる可能性あり。		使用不可 大至急点検をうけてください。

### 電極パッド使用期限

電極パッドの有効期限年月が窓部分から確認できます。



チャージパックと電極は、一回使用後又は有効期限(製造よりおよそ2年)前に必ず交換して下さい。



## 操作性 使い方は3ステップのシンプル操作!

直感性を意識したデザインとクリアでゆっくりとした音声ガイダンスで救命処置をサポートします。

ON/OFFボタンを押して電源を入れ、カバーを開けます。	電極を取り出し患者に貼り付けます。	除細動が必要な場合に、点滅する赤ボタンを押します。
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>

いざという時あわてないように、定期的なトレーニングが大切です!

### AEDトレーナー

5207500 CR-T

¥75,000 (税込¥81,000)

〈セット内容〉  
 本体、トレーナー用電極キット  
 リモートコントローラ  
 本体用単1形アルカリ乾電池4本  
 リモコン用単4形アルカリ乾電池2本  
 (いずれもモニター用)  
 操作マニュアル  
 キャリングケース1個



※AEDトレーナーはエネルギーの出力、解析機能は内蔵していません。

### JAMY-P+CR-T

5207800

¥96,000 (税込¥103,680)

簡易型蘇生法教育訓練モデルとAEDトレーナーとのセットです。



※AEDトレーナーはエネルギーの出力、解析機能は内蔵していません。

# AEDの設置場所がすぐわかる 明るいカラーリングの収納ケース

## AED収納ケース（壁面設置用）

4695700 AED-C

¥58,000 (税込¥62,640)

大きさ:約39.8(縦)×39.8(横)×19(奥行)cm  
内寸:約34(縦)×34(横)×16(奥行)cm  
重さ:6kg  
材質:フタ(扉)/プラスチック製、本体/金属製  
付属品:警報装置(本体取付済み)90dB/m、  
壁固定用ネジ・アンカー、  
AED設置表示パネル(21×25cm)、  
CPR手順説明パネル(A4判)、  
設置管理者表示シール



※壁面への設置には別途取り付け工事費がかかります。

## AED収納ケース・スタンドセット

5210600 AED-S

¥116,000 (税込¥125,280)

収納ケースの大きさは、設置場所に応じて3段階から選定可能。

スタンドセット時の大きさ:約50(縦)×50(横)×157(高さ)cm

スタンドセット時の重さ:25kg

スタンド材質:金属製、ケース取り付け高さ(床面からケース下面まで)

約82、77、72cmの3段階から選択可



AEDの収納状態を外部から確認!

設置管理者表示、  
及び機器点検記録記入表!

扉を開けると大きな警報音  
(約90dB/m)が鳴ります。

※デザインが変更になる場合があります。ご了承ください。

### ヤガミからのご提案!

AEDは卒業記念や寄贈としてもご採用頂いています。  
収納ケース用名入れラベルをご用意できますので、お問い合わせ下さい。

(仕様)  
書体:ゴシック体  
カラー:黒一色  
サイズ:19×6cm

※名入れ例



屋外設置用の  
AED収納ケース(スタンド型)  
もご用意できます。

最寄りの弊社営業部署へ  
お問い合わせください。



## AEDの設置場所の案内に 便利な表示パネル

### AED設置表示パネル

5210800 ¥1,000 (税込¥1,080)

21×25cm両面印刷

### 壁面固定用金具 (AED設置 表示パネル用)

5210900 ¥2,400 (税込¥2,592)

付属品:アルミアングル 1本  
表示パネル取付用ネジ(ナット付) 2本  
壁面固定用プラスチックアンカー 3本  
壁面固定用ネジ 3本

両面印刷シールなので、ガラス面に貼れば表裏両側から確認できます。

### AED設置表示ステッカー

5210700 ¥2,500 (税込¥2,700)

5枚組 (A5サイズ両面印刷)

